

BESLAGNUMMER: (invullen indien van toepassing) BE - - VERANTWOORDELIJKE (VEEHOUDER): Naam: Straat en nr.: Postcode.: Gemeente: E-mail: BEDRIJFSDIENARTS: ☐ Stempel en ordnummer:	RESULTAAT aan: ☐ Bedrijfsdierenarts ☐ Aanvrager ☐ Verantwoordelijke ☐ Andere* FACTUUR aan: ☐ Bedrijfsdierenarts ☐ Aanvrager ☐ Verantwoordelijke ☐ Andere* ☐ Project/contract:..... * Invullen indien 'Andere' aangekruist: Naam: Straat en nr.: Postcode.: Gemeente: BTW : Fax : NAAM EN HANDTEKENING AANVRAGER : Naam:.....
DATUM MONSTERNAME:/...../..... Uur monstername :h.....min UW REF: OPMERKINGEN/ AFWIJKINGEN:	MONSTERNEMER: ☐ DGZ..... ☐ Dierenarts ☐ Veehouder ☐ Andere:.....

AARD VAN DE MONSTERS

☐ zaagsel	☐ in opslag ☐ in gebruik	☐ stro	☐ in opslag ☐ in gebruik	☐ zand	☐ in opslag ☐ in gebruik
☐ gescheiden mest	☐ in opslag ☐ in gebruik	☐ ander specificeer:	☐ in opslag ☐ in gebruik		

Monsters gekoeld: ☐ ja ☐ neen

REDEN ONDERZOEK :

- ☐ telling Coliformen, Klebsiella spp, Staphylococcus spp. Streptococcus en Streptococcus-achtige organismen
- ☐ totaal kiemgetal 37°
- ☐ droge stofbepaling

Nr.	Aard van het monster	Identificatie (uw referentie)
1		
2		
3		
4		
5		

VAK VOORBEHOUDEN AAN HET LABORATORIUM Ontvangst: ☐ Torhout ☐ Lier	Wijze ontvangst: ☐ receptie/loket ☐ ophaaldienst ☐ nachtkluis ☐ post ☐ externe koerier	AC: / / LIMS DOSSIERNR(S): paraaf: TC: / / paraaf:
Datum + initialen: / /		

Handleiding voor bemonstering beddingmateriaal

Het correct bemonsteren van beddingmateriaal is essentieel voor het verkrijgen van nauwkeurige en betrouwbare laboratoriumresultaten. Deze handleiding geeft je stapsgewijze instructies om ervoor te zorgen dat het monster representatief is voor het gebruikte beddingmateriaal.

Benodigdheden

Voor een correcte bemonstering maak je (bij voorkeur) gebruik van ons monsternamepakket. In dit pakket vind je alles wat je nodig hebt om snel en efficiënt aan de slag te gaan:

- Deze handleiding;
- Propere handschoenen;
- Een goed afsluitbare ziplockzak en monsterpot van 1 liter;
- Het aanvraagformulier onderzoek beddingmateriaal.

Zorg zelf voor een goed gereinigde en droge emmer.

Monstername

1. Neem de **ziplockzak (stro) of monsterpot** (zaagsel, zand of gescheiden mest).
Zorg voor een goed afsluitbare ziplockzak indien je ons monsternamepakket niet gebruikt.
2. Vul de **identificatiesticker** volledig en correct in. Indien je ons monsternamepakket niet gebruikt, dien je zelf een goede identificatie aan te brengen op de gebruikte recipiënt.
3. Trek **propere handschoenen** aan en draag ze gedurende de gehele monstername.
4. **Voer de bemonstering uit** op de locatie die voor jouw onderzoek belangrijk is.
 - Bemonstering van de **ligplaatsen in de stal/compartiment/box** (gebruikt materiaal):
Neem 5 tot 10 grepen beddingmateriaal van het oppervlak van het beddingmateriaal, verspreid over verschillende plekken in de stal/compartiment/box.
 - Bemonstering van de **opslag van beddingmateriaal** (ongebruikt materiaal):
Neem 5 tot 10 grepen beddingmateriaal van het oppervlak van het beddingmateriaal én op minstens 30cm in diepte, verspreid over verschillende plekken in de hoop.
5. Doe de verzamelde grepen beddingmateriaal in een **gereinigde en gedroogde emmer**.
6. **Meng het beddingmateriaal** in de emmer totdat al het materiaal gelijkmatig gemengd is.
7. **Vul de recipiënt** met zoveel mogelijk materiaal.
8. Vul het bijgeleverde **aanvraagformulier** volledig en correct in.
9. **Bezorg het monster en het aanvraagformulier** rechtstreeks of via onze koerier aan DGZ Labo. Houd het monster bij voorkeur **gekoeld** om overgroei van kiemen te voorkomen en een optimale analyse te garanderen.