


Tips voor een goede plaatsing van een BVD-oormerk

- ✓ Check of het oormerk in goede staat is. Het groene vlak van het vrouwelijk BVD-oormerk mag in geen geval geschonden zijn. Controleer ook of de tang in goede staat is.
- ✓ Plaats de oormerken pas wanneer de oren van het kalf droog zijn.
- ✓ Fixeer het kalf zodat het zo min mogelijk kan bewegen.
- ✓ Plaats het oormerk niet te dicht bij een pees of een stukje kraakbeen. Zo hebt u minder kans op een leeg oorbiopt.
- ✓ Plaats eerst het BVD-oormerk omdat het kalf na plaatsing van het eerste oormerk actiever wordt.
- ✓ Gebruik voldoende kracht om de tang maximaal dicht te knijpen. Het kan helpen om vooraf de pin in het been van de tang te verwijderen.

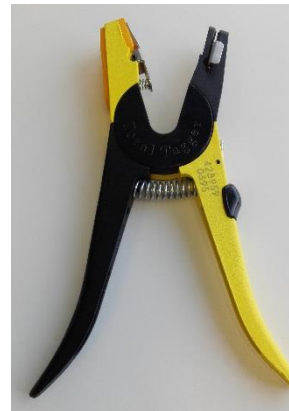


Figuur 1: Tang sluiten met pin



Figuur 2: Tang sluiten zonder pin



- ✓ Open de tang na het plaatsen zo traag mogelijk. Zo zorgt u ervoor dat het oorweefselstaal in het staalnamebuisje vastgehecht blijft. Let erop dat de opening naar boven gericht is. De staalname is gelukt als u geen rood kruis in het staalnamebuisje ziet.

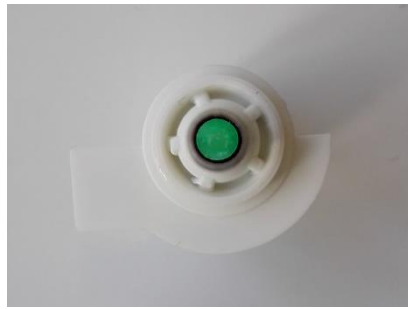

Figuur 1: Staalname is gelukt



Figuur 2: Staalname is niet gelukt

- ✓ Sluit het staalnamebuisje met de overeenstemmende doorzichtige capsule.